

**Technische Daten:**

**Geräteart:** TENS/EMS-Kombination (Zweikanal-Ausführung)  
**Output Leistung:** 0-50 V in 20 Stufen einstellbar (bei 500Ω) bei TENS  
 0-65 V in 20 Stufen einstellbar (bei 500Ω) bei EMS  
**Output Intensität:** 0-98 mA in 20 Stufen einstellbar (bei 500Ω)  
**Frequenz:** 47 Frequenzen von 1 – 200 Hz einstellbare;  
 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 Hz  
**Impulsbreite:** 9 Impulsbreiten im Const-TENS-EMS-Modus einstellbare;  
 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 und 250 µs  
**Impulsform:** Symmetrisch mono-phasischer Rechteckimpuls (bei TENS)  
 Symmetrisch bi-phasischer Rechteckimpuls (bei EMS)  
**Programme:** **1+8 Therapieprogramme – 1 Programm** (frei definierbar) **+ 8 Programme** (weitestgehend fixiert)  
**Const – TENS - EMS** (individuell / frei definierbare Parameter lt. obiger Werte)  
**Burst I** – 2 Burst pro Sekunde und jeder Burst mit 7 Einzelimpulsen/150 µs  
**Burst II** – 2 Burst alle 2 Sekunden und jeder Burst mit 80 Einzelimpulsen  
**Modulation I**– Impulsbreite modulieren zwischen 50 – 250 µs, „Rampe auf“ für 6 Sekunden und „Rampe ab“ für 6 Sekunden  
**Modulation II**– Frequenz moduliert in permanentem Wechsel fallend von 100Hz auf 20Hz innerhalb von 6 Sekunden, danach steigend von 20Hz auf 100Hz innerhalb weiterer 6 Sekunden.

EMS Modes	Frequenz (Hz)	Pulsweite (µs)	Rampe/Auf (sec)	Dauer (sec)	Rampe/Ab (sec)	Pause (sec)
Cycled I	30	400	5	20	5	10
Cycled II	55	400	5	30	5	20
Reciprocal I	30	400	5	20	5	20
Reciprocal II	55	400	5	30	5	30

**Batterien:** 2 x 1.5V AA Batterien (Typ LR6)  
**Gewicht:** 90 g (ohne Batterien)  
**Abmessungen:** 90 x 65 x 21 mm

**Zusatzfunktionen:** Automatische Speicherung aller Parameter beim Ausschalten (ohne Intensitätsanzeige).  
**Zeitspeicher:** Kumulierte Zeitspeicher der Anwendungszeit (Therapiekontrolle) von 0-99 Stunden mit Rückstellungsmöglichkeit (Reset)  
**Sicherheitsabschaltung:** Intensitätsstellung "0" an beiden Kanälen für mehr als 5 Minuten führt zur Abschaltung.  
**Batteriekontrolle:** Blinkendes Batteriesymbol bei schwachen/leeren Batterien  
**Intensitätsabschaltung:** Haben die Elektroden bei der individuellen Intensitätseinstellung keinen Hautkontakt, wird die Intensität automatisch zurück gestellt und kann erst wieder bei Hautkontakt erhöht werden.